

FICHE D'INFORMATION UTILISATEUR – VÉHICULE POUR PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP (VPH) – ÉLECTRIQUE

Document à remettre et à cosigner – à conserver par l'utilisateur et le distributeur

Marque / Modèle :

N° de série :

Distributeur (raison sociale) :

Utilisateur :

Téléphone :

Date de mise à disposition : / /

1) Règles essentielles d'utilisation

- Utiliser le VPH conformément à son **manuel d'utilisation**. Ne pas modifier le matériel sans accord écrit du distributeur/fabricant.
- **Positionnement et sécurité** : boucler la ceinture/harnais le cas échéant. Garder les pieds sur les repose-pieds, les mains à l'intérieur de l'empattement.
- **Environnement** : franchir les obstacles prudemment, aborder les pentes dans l'axe, éviter les surfaces glissantes. Respecter la **pente maximale** et la charge utile indiquées pour le modèle.
- **Transport** : éteindre et immobiliser le VPH. Utiliser des **sangles d'arrimage** homologuées et les points prévus à cet effet. Ne pas rester assis dans le VPH si le véhicule de transport n'est pas équipé pour le transport assis en fauteuil.
- **Électronique** : éteindre le VPH avant branchement/débranchement du chargeur ou d'accessoires.

Je confirme avoir reçu le manuel d'utilisation du modèle livré et m'engage à m'y référer pour toute consigne détaillée.

2) Assurance et circulation

- Vérifier auprès de votre **assureur** la couverture **responsabilité civile** pour l'usage du VPH, notamment lors de la circulation sur voies ouvertes au public.
 - Respecter le **Code de la route** et la signalisation locale. Adapter la vitesse aux piétons et aux conditions (pluie, nuit, affluence). Sur trottoirs et zones piétonnes, circuler à **allure modérée** ($\approx \leq 6$ km/h).
-

3) Vitesse

- Utiliser les **réglages de limitation de vitesse** fournis. Démarrer en vitesse réduite jusqu'à parfaite maîtrise du VPH.
 - Ne pas rouler à pleine vitesse sur pentes, sols irréguliers, zones encombrées ou humides.
-

4) Entretien courant (utilisateur)

- **Nettoyage** : chiffon doux légèrement humide (pas de lavage haute pression ni solvants). Protéger les connectiques de l'humidité.
 - **Pneus/roues** : vérifier usure, pression (si pneumatiques) et serrages visibles.
 - **Freinage/antibascules** : contrôler le bon fonctionnement avant chaque sortie.
 - **Batteries** : suivre strictement les consignes de charge ci-dessous. Éviter les décharges profondes répétées.
 - **Contrôles périodiques** : faire vérifier le VPH par le distributeur selon la fréquence recommandée ou en cas de choc/incident.
- Toute intervention non conforme peut affecter la sécurité et la garantie. Conserver les justificatifs d'entretien.

5) Consignes de charge des batteries (AGM/GEL) – Résumé utilisateur

(Se référer à la notice du modèle et au document « Consignes de charge batteries » pour le détail complet.
<https://www.pridemobility.fr/wp-content/uploads/sites/16/2018/02/SUBS-FR-SER0100-15-Rev.0-Consignes-de-charge-batteries.pdf>)

Démarrer une charge (ordre de branchement)

1. **Éteindre** le VPH.
2. Brancher **d'abord** la fiche du **chargeur au VPH** (prise dédiée/manipulateur).
3. Brancher **ensuite** le chargeur sur la **prise secteur**.
4. Laisser la charge **se terminer** (voyant **vert fixe** du chargeur). Un cycle complet dure en général **8 à 10 h**.
5. Débrancher le **secteur**, puis débrancher la **fiche chargeur du VPH**.

Quand charger ? (Concerne les batteries AGM et Gel uniquement)

- **À la première mise en service** (matériel neuf ou batteries neuves) : 24 h d'une traite (sans interruption).
- **Premier mois d'utilisation** : utiliser le VPH **tous les jours et recharger chaque jour** (même après un court trajet). Capacité optimale atteinte après **~25 cycles**.
- **Ensuite (régime de croisière)** :
 - o Usage **intensif** : **tous les jours**.
 - o Usage **modéré** : **tous les 3-4 jours max** entre deux charges.
- **Toujours** laisser la charge **aller à son terme** (éviter les charges interrompues).

Seuils indicatifs selon l'afficheur (Concerne les batteries AGM et Gel uniquement)

- Indication $\geq 70\%$ (jauge verte) : **ne pas** lancer une charge inutile.
- Indication $\approx 40-70\%$ (jauge intermédiaire/jaune) : **lancer** une charge **sans interruption**.
- Indication $\leq 30\%$ (jauge rouge) : **recharger immédiatement sans interruption**.

Bonnes pratiques et stockage

- Éviter de descendre **régulièrement sous 40 %**.
 - Des **charges incomplètes** et les charges **trop fréquentes** quand la batterie est déjà **> 80 %** réduisent sa durée de vie.
 - En **inutilisation**, effectuer une **charge toutes les 2 semaines** pour préserver les batteries.
- Lithium** : se référer aux consignes spécifiques du fabricant (procédures et indicateurs peuvent différer).

6) Traçabilité et documents remis

- ☐ Manuel d'utilisation du modèle livré (référence/édition)
- ☐ Fiche « Consignes de charge batteries » (réf. interne)
- ☐ Attestation de mise à disposition et réglages
- ☐ Coordonnées SAV / maintenance

7) Accusé de réception – Cosignature

Je soussigné(e), _____, reconnais avoir reçu et compris la présente fiche et les documents associés. Je m'engage à respecter les règles d'utilisation, d'assurance, de vitesse, d'entretien et de charge des batteries.

Mme/Mr _____ atteste avoir remis et expliqué ces informations, et rappelle la disponibilité du manuel d'utilisation.

À _____, le / /

Distributeur

Utilisateur

Nom / Qualité : Nom :

Signature cachet : Signature :

Références utiles

- Manuel d'utilisation du modèle livré (lien/QR code à compléter par le distributeur).
- Notice officielle « Consignes de charge batteries ».

Format : A4 – Impression recto. Version : ____ / ____.